


アラームセンサー

あんそく音

人工呼吸器の異常！カニューレの外れ！痰のつまり！に



- **アラーム音・アラーム信号を検知して異常をお知らせ**  
人工呼吸器のアラーム音を検知して、異常を知らせます。
- **いろいろな機種的人工呼吸器に取付可能**  
現在お使いの人工呼吸器に取り付けができます。
- **離れた場所に知らせることが可能**  
ワイヤレス（無線）を使うことで離れた場所へ知らせることができます。
- **ナースコール併用が可能**  
ナースコール分配器（別売）を接続すると、既存のナースコールも併用することができます。
- **設置や移設が簡単**  
人工呼吸器にマジックテープで固定するだけなので簡単です。

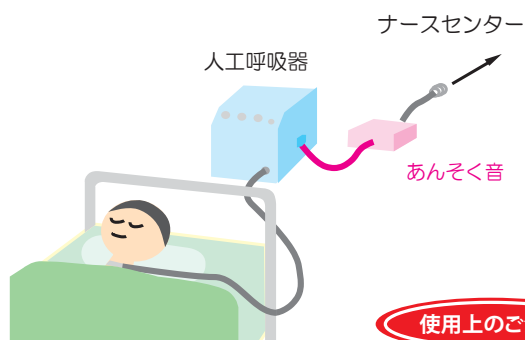

使用上のご注意

本機器は、患者や機器の異常を検知して通報しますが、安全を保証する機器ではありません。あくまで、補助機器としてご使用ください。

アラームセンサー


あんそく音

人工呼吸器は呼吸を確保する重要な機器です。病院や在宅で痰の詰まりや気管カニューレの外れ等のトラブルが発生した時に、人工呼吸器はアラーム音を発生します。しかし、アラーム音が病室からナースセンターへ届かず（聞こえず）事故になる心配があります。医療や介護のリスク管理が重視される中で人工呼吸器アラームセンサーは、安全を確保するのに役立つ機器です。

用途

- 痰の詰まりによるアラーム（高圧アラーム）
- 気管カニューレの外れによるアラーム（低圧アラーム）
- 人工呼吸器の異常・トラブルによるアラーム
- 各種機器のアラーム音・アラーム信号に対応

機器構成図

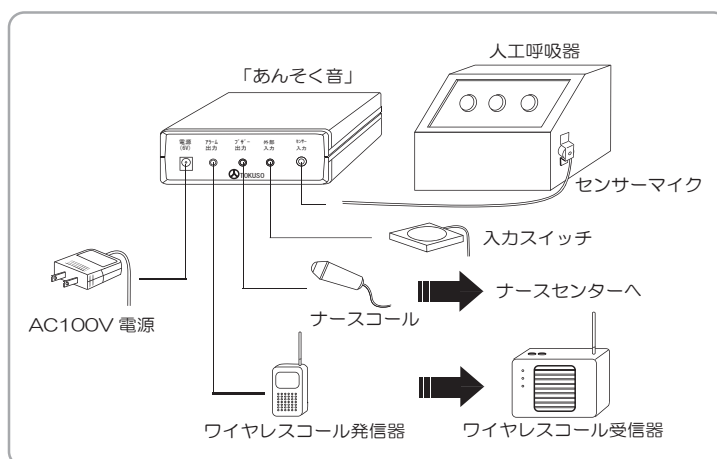

使用例

- ①人工呼吸器に検知センサー部を取り付けます。
- ②たん吸引時を考慮して遅延時間を設定します。
- ③人工呼吸器のアラーム音が鳴ると、そのアラーム音を検知して数秒後（遅延時間後）に離れた場所の介護者に異常を知らせます。
- ④ワイヤレスコールに接続すると離れた場所の介護者やナースセンターに通報します。
- ⑤病院のナースコールシステムに接続することができます。

仕様

商品名	人工呼吸器アラームセンサー「あんそく音」
品番	00078D00
電源	ACアダプタ（6V）
検知方式	人工呼吸器のアラーム音を検知 （一定時間アラームが鳴ると異常通報）
設定	遅延タイマー設定（痰吸引時間等）
通報方式 （別途費用）	①ナースコールへ接続（病院・施設等） ②ワイヤレスコールで通報（在宅用）
外形寸法	幅145×高38×奥131mm
重量	280g
価格	48,000円（税抜）

※製品改良のため、予告なく仕様および価格等を変更する場合がありますので、ご了承ください。

【販売店】

【製造販売元】

徳器技研工業株式会社

〈本社〉  
〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地  
TEL : 0978-33-5595 FAX : 0978-33-5596  
MAIL : info@amor.co.jp HP : http://www.tokuki.net