

【仕様】

販売名	アモレスU1
商品番号	00105A00
医療機器区分	管理医療機器
一般的名称	電動式可搬型吸引器
医療機器承認番号	22000BZX00898000
吸引圧力	0～80kPa
排気流量	0～16L/分
吸引ビン容量	1000ml
電源	100V (DC24V, 59VA)
本体寸法	W240×D180×H233mm (持手部除く)
質量	約5kg
標準付属品	・吸引ホース・吸引フィルタ・ACアダプタ ・吸引ピンセット・お試用吸引カテーテル
JANコード	4560346570408



【別売交換部品】



NO	商品名	商品番号	NO	商品名	商品番号
①	吸引ピン本体	00105A01	⑦	カテーテルジョイント (従来型カニューレ用)	00105A08
②	吸引ピンフタセット (パッキンは別売)	00105A04	⑧	フィルタ用ホース 吸引ピン側	00105A09
③	吸引ピンフタ用パッキン	00105A05	⑨	フィルタ用ホース 本体側	00105A10
④	吸引ホース	00105A02	⑩	ACアダプタ	00105A03
⑤	フィルタAM	00105A06	⑪	ルアーコネクター 2ヶ/セット (新型カニューレ用)	00105A17
⑥	ホースアダプター 2個セット	00105A07			

【お願い】

医師または医療従事者の指導のもとで使用してください。

- ①採血用には使用しないでください。
- ②食品・薬品の吸引には使用しないでください。

※製品の改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

—EMC適合—

EMC (電磁両立性) に適合しています。  
(国際規格 (IEC60601-1-2:2001))  
※EMC (Electro Magnetic Compatibility)  
機器が電磁波 (ノイズ) を出しにくく、また電磁波 (ノイズ) の影響を受けにくい機器

《製造販売元》

—医療福祉に技術で貢献する—

トクソー技研株式会社

◇メールアドレス info@amor.co.jp

◇ホームページ http://tokso.net/

◇本社

〒879-0232 大分県宇佐市大字大根川318  
TEL.0978-33-5595 FAX.0978-33-5596

痰吸引器 アモレスU1  
AMOR SU1

人にやさしい吸引を

優しく  
幅広く

静かに  
強く

安心と  
安らぎを



いつも笑顔でいたい  
家族の笑顔を見ていたい  
だから「人にやさしい」吸引器



AMOR SU1

POINT  
1

### 少量吸引で静かに強く

少ない流量でゆっくり静かに、しかも力強く吸引します。

POINT  
2

### 流量と圧力の調節が独立

状況に合わせて 多く～少なく、強く～弱く 吸引できます。

POINT  
3

### 優しく幅広くたん吸引

少ない流量でゆっくり吸引しますので、本人に優しく安心です。  
また、すぐに吸引する時は大流量で幅広くたん吸引ができます。

## 外観



## 操作方法

- ① 運転スイッチを入れます。
- ② 圧力調整つまみを回して吸引圧力を調整します。
- ③ 吸引流量つまみを回して吸引流量を調整します。
- ④ 吸引ホースの先端をつぶして吸引圧力が上昇することを確認します。
- ⑤ 吸引ホースの先端に吸引カテーテルを接続して吸引して下さい。




## 使い方


唾液等の口腔内の吸引や  
気管内の痰を、ゆっくり・強く  
吸引する時に



唾液等の口腔内の吸引や  
気管内の痰を、早く・中位の力で  
吸引する時に

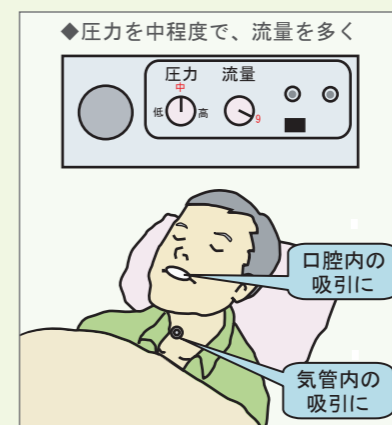

気管内の痰を、早く・強く  
吸引する時に

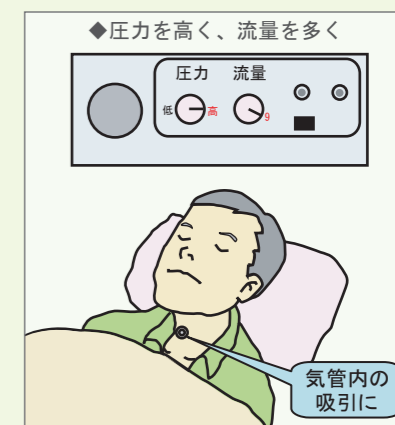

## 設置について

- ① ご本人様より低い位置に本体を置いて使用してください。  
(吸引物の逆流や吸引ホース内の溜まりが防止できます。)
- ② 安定した床面や架台に設置してください。  
(静かに運転できます。)