

スマートスタンド



ベッドに寝たまま
パソコンやモニターが
「楽に」「見やすく」
使用できます

1 ベッドに寝たまま使用できる

キャスター部の高さが65mm以下ですので、ベッドの下にキャスター部を入れることが可能です。

2 搭載台の高さ、傾斜角度の調節

前後、左右、回転等のあらゆる角度、位置調節が可能です。

3 大径キャスター付で移動が容易

大径キャスターが付いていて移動が容易です。柔らかい床面や凹凸のある場合でも移動が容易です。

4 意志伝達装置の設置

伝の心パネル型やタブレット、レッツ・チャットが設置できます。搭載台の寸法調節が可能です。

5 モニターの設置

VESA規格対応です。

※「スマートスタンド」は、補装具の重度障害者用意思伝達装置の補助対象品目です。

構造



安心設計




最も荷重のかかる部分には2カ所のストッパー金具で強力固定。

使用方法

- ①全体を組み立てます。
- ②ノートパソコン、各種モニター、レッツ・チャットの取り付けが可能です。
- ③各種モニターは、VESA規格の取付方法になっています。
- ④高さを調節して、見やすい角度に傾けて、設置してください。
- ⑤使用者の見やすい位置に置いて、後部側のキャスターをロックしてください。

仕様

商品名	パソコン固定台「スマートスタンド」
品番	00114E00
寸法	スタンド部：幅600×奥560×高900～1400(mm) 搭載台：縦280×横300(mm)
材質	搭載台、フレーム、支柱：スチール アーム：ステンレス
質量	7kg
耐荷重	5kg以下

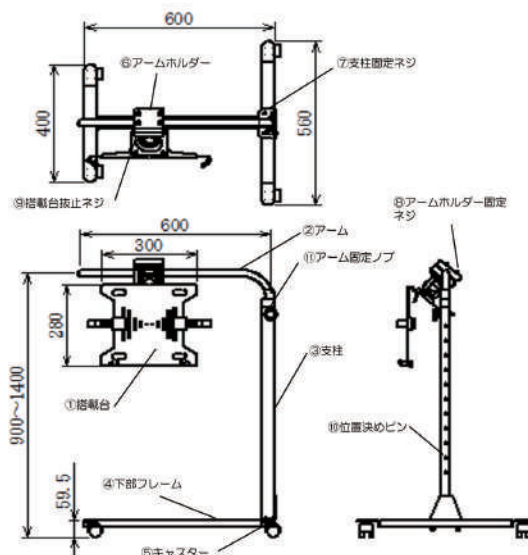

お願い

- ①耐荷重以内でご使用ください。
- ②アームは回転可能ですが、脚部の範囲内でご使用ください。(不安定になります)
- ③不安定な取付方法や、固定方法はしないでください。
- ④コード等は、からまない様に確実に配線してください。

【販売元】

【製造元】 ー医療・介護・福祉に技術で貢献するー

トクソー技研株式会社

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
 TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
 MAIL info@amor.co.jp HP http://www.tokso.net
 2022.10