

持続式スイッチとピエゾセンサーなどのパルス式スイッチの両方で
スイッチ入力とコール操作の切替が可能です。



■パルス式スイッチで、スイッチ入力とコール操作が可能

微かな動きを検知するパルス式スイッチを使用して入力操作ができます。

■1つのスイッチを使って、機器操作とコール操作

通常は意思伝達装置などの機器操作をし、パルス式スイッチは一定時間内に4回のスイッチ操作でコール出力に、持続式スイッチは長く押し続けるとコール出力に切り替わります。

■誤動作防止設定

まばたきや不随意等で誤入力しないように、スイッチ操作を一定時間保持すると出力するように設定できます。

各種の入力スイッチと組み合わせて
使用します。例えば・・・

※入力スイッチは別売です。

■ ハンドスイッチ (持続式スイッチ)



手や足の軽い力で押して
スイッチ操作。

■ ホットタッチスイッチT (持続式スイッチ)




頬などで、先端のレバーを
曲げることでスイッチ操作。


■ 筋電センサー (パルス式スイッチ)



眼球移動などによる顔の
筋肉の動きでスイッチ操作

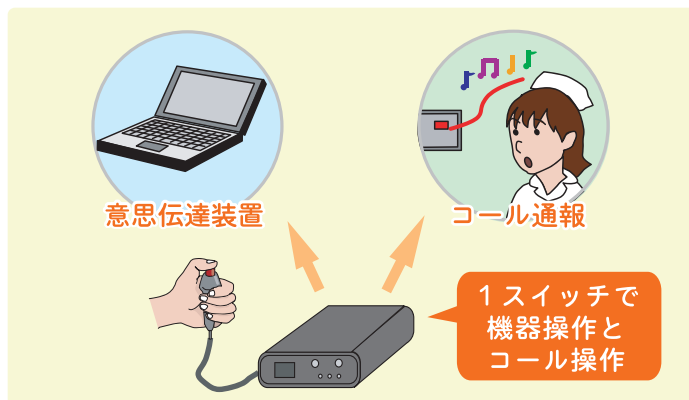

■ 接続図

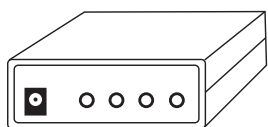

入力スイッチは、身体の機能に
応じて様々なスイッチから
お選びいただけます。

■ コール出力

- ・ナースコール (病院・施設)
- ・ワイヤレスコール (在宅) など

■ スイッチ出力

- ・意思伝達装置
- ・環境制御装置 など

■ パルス式スイッチ入力

- ・ピエゾセンサー など

■ 持続式スイッチ入力

- ・プッシュスイッチ
- ・タッチセンサー など

電源 (AC100V)

■ 使用図



仕 様

商品名	呼び鈴分岐装置 「スイッチパートナーS X」
品番	00154A00
電源	ACアダプタ (DC6V)
入力	持続式入力：φ3.5mm/7.62mmラック / パルス式入力：φ3.5mm/7.62mm
出力	スイッチ出力：φ3.5mm/7.62mmラック / コール出力：φ3.5mm/7.62mm
寸法	150mm(幅)×40mm(高)×110mm(奥行)
重量	250g (本体のみ)
価格	33,000円 (税抜30,000円)

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

【お問い合わせ先】

一 医療福祉に技術で貢献する
トクソー技研(株)

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP http://www.tokso.net