

たいせつなひとに
“あんぜん
あんしん”を

人工呼吸器の外れ防止具 レスピセーフバンド




人工呼吸器の回路外れ事故は重篤なトラブルにつながります。
気管チューブのコネクタ接続の回路外れを防止して、安心、安全を確保します。

特長


- ✓ 回路外れを防止します
- ✓ 簡単に取付けができます
- ✓ 長さ調節で各種の気管チューブに対応可能です
- ✓ 伸縮可能で痰吸引時の着脱が容易です

レスピセーフバンド

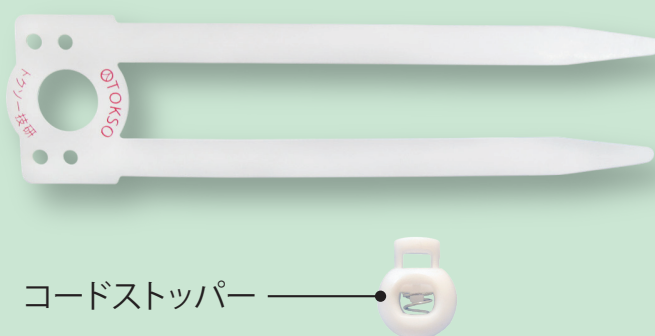

取付例

「レスピセーフバンド」は、気管カニューレと人工呼吸器の蛇腹管の接続を保持するので、外れ事故を防止します

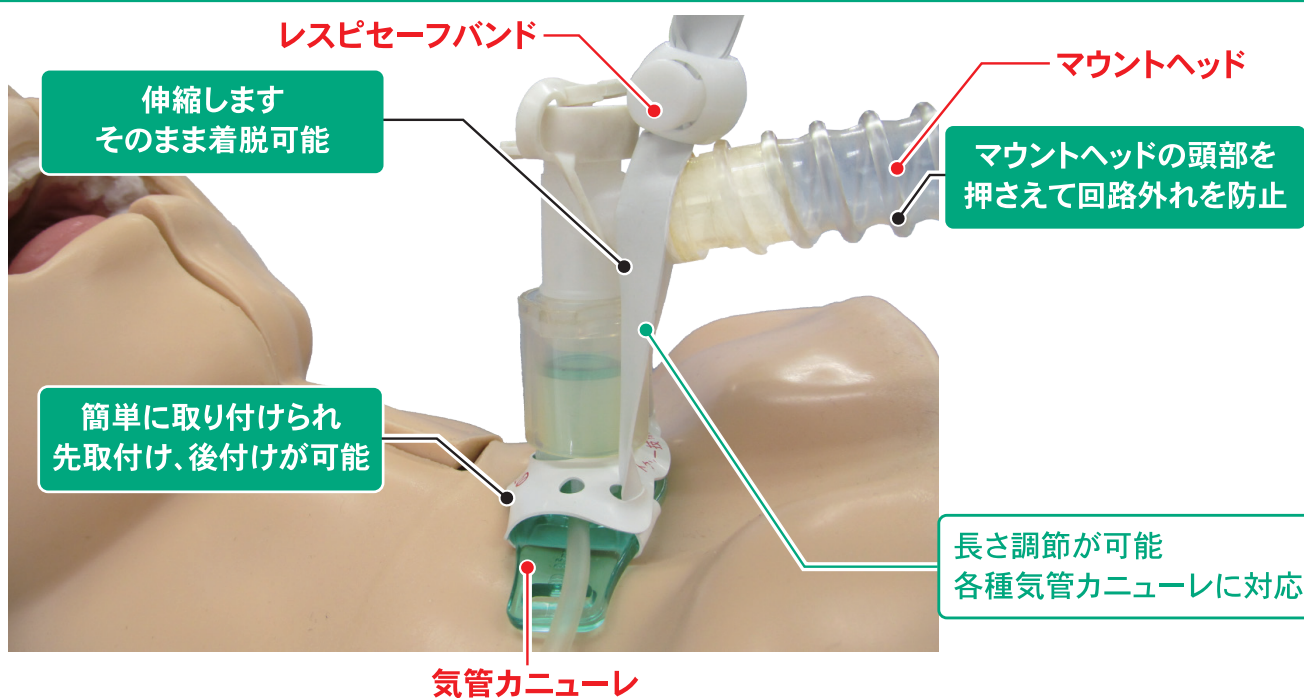

～やさしさをカタチに～



トクソー技研株式会社


<https://www.tokso.net>



人工呼吸器の外れ防止具 レスピセーフバンド

使用方法

- 1 気管チューブのコネクタ円筒部に
レスピセーフバンドの中央穴部を差し込みます
- 2 レスピセーフバンドの固定ヒモを気管チューブの
フランジ(翼部)を通します
- 3 固定ヒモ部をレスピセーフバンドの固定穴に
通してフランジ(翼部)に固定します
- 4 マウントヘッドのコネクタ部を接続して
固定ヒモの固定長さを決めます
- 5 適切な長さまでコードストッパーを調節し
固定します
- 6 マウントヘッドの頭部に固定ヒモを掛けて
コネクタ接続部を押さえます

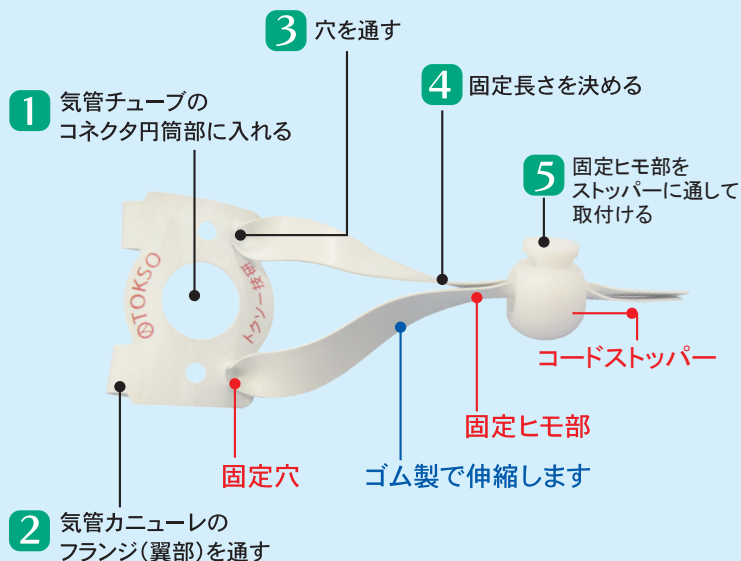

接続を確実に保持します



痰吸引時の着脱もラクラク

仕様	商品名	レスピセーフバンド
	商品番号	00214D00
	本体寸法	横45×長170×厚0.5mm
	材質	合成ゴム
	本体重量	2g/個
	梱包仕様	5個/箱
	交換目安	使用開始から2週間程度


人工呼吸器の回路の接続が外れ、患者に影響があった事例が報告されています

人工呼吸器の使用時、回路の接続が外れていた、または緩んでいたため患者に影響があった事例が39件報告されています。

(集計期間: 2017年1月1日～2021年5月31日)

この情報は、第64回報告書「再発・類似事例の分析」で取り上げた内容をもとに作成しました。

図のように気管チューブのコネクタ接続部の外れ事故は19件と最も多い割合で発生しています。その理由は、コネクタ接続部はテーパ状の筒に差し込むだけの摩擦力で保持していますので保持力は弱くなります。また、痰吸引等でコネクタ着脱が多いので、うっかりすると緩く接続される場合があります。その場合に人工呼吸器の呼気の内圧や振動で、コネクタ接続部が外れて思わぬトラブルになることがあります。

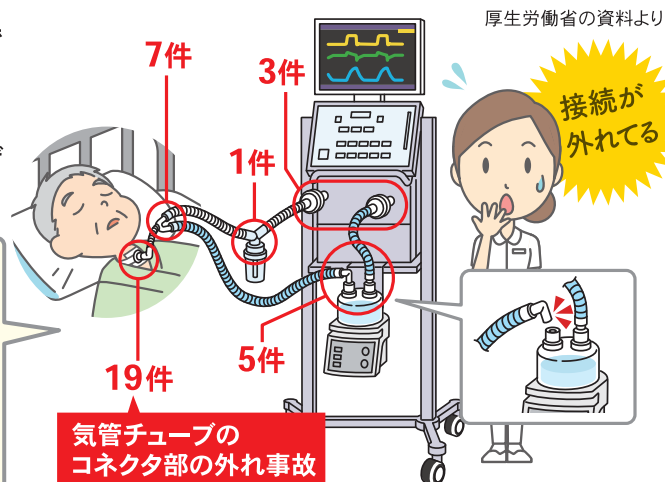

※接続が外れた、または緩んだ部位が不明の事例が4件あります。

注意

- 本商品はあくまで補助具としてご使用ください。 ●万一発生した人身事故や損害については、責任を負いませんのでご了承ください。
- 人工呼吸器の蛇腹管に無理な力が掛からないようにしてください。 ●長さ調節をして人工呼吸器の蛇腹管が簡単に外れないことを確認してください。
- 本商品は消耗品ですので、定期的、または劣化時には交換してください。

※製品改良のため、予告なく仕様および価格等を変更する場合がありますので、ご了承ください。

製造販売元



～医療・介護・福祉に技術で貢献する～
トクソー技研株式会社

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地

TEL 0978-33-5595

FAX 0978-33-5596

E-mail info@amor.co.jp

HP http://tokso.net

