


離床センサーのこんなお悩みありませんか？

- ①介助時、ナースコール誤通報になる。
- ②介助後、ナースコール分配器の入れ忘れがある

- ①「お世話タイマー」は
離床センサーの通報を一時停止し
誤通報を防止します。
- ②「お世話タイマー」は
設定時間後、自動復帰するので
離床センサーの入れ忘れの心配が
ありません。

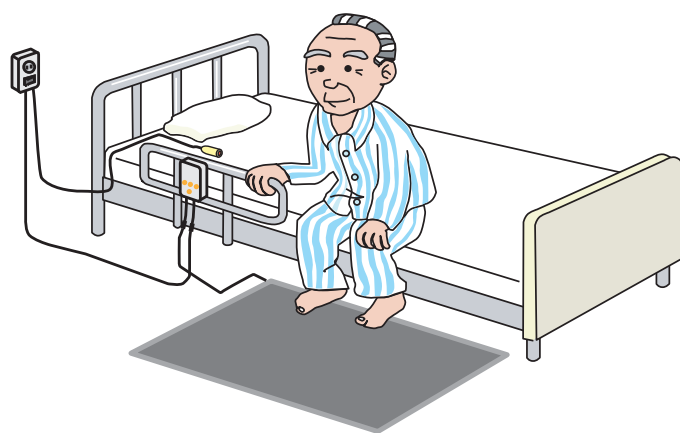

- ・フックを引っかけてかんたん設置——
ベッドサイドレール等に付属のS型フックを
引っかけて固定します。
- ・選べる3つの設定時間——
3分、5分、10分の設定時間を変更できます。
- ・コンパクトな形状——
小さなスペースでも簡単に設置が出来ます。




■使用方法


①タイマー設定ボタンを押します



②介助作業を行います。

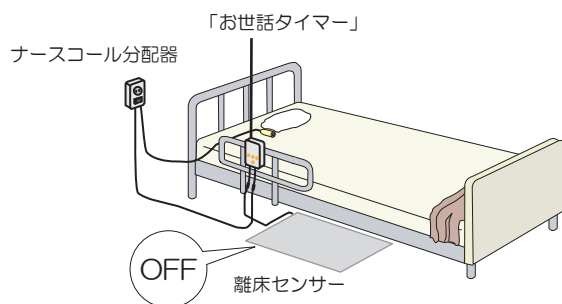

③設定時間経過後、離床センサーが動作します。

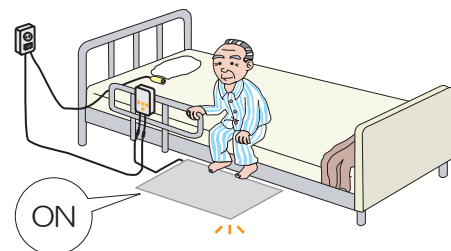

■対応離床センサー

 品名：ふむナルLW 品番：00127A00	
外形寸法	幅500mm×長900mm×厚5mm
重量	1.5kg
電源	不要
検知方式	マットを踏むと検知して通報
内容構成	センサーマット

 品名：ふむナルL3 品番：00127B00	
外形寸法	幅500mm×長1350mm×厚5mm
重量	2.0kg
電源	不要
検知方式	マットを踏むと検知して通報
内容構成	センサーマット


 品名：おきナルTW2 品番：00138B00	
外形寸法	幅220mm×長800mm×厚5mm
重量	センサーマット:700g、コントローラ:200g
電源	ACアダプタ (DC6V)
検知方式	マットから離れると検知して通報
内容構成	センサーマット、コントローラ、接続コード、ACアダプタ

その他各種離床センサーをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。


※製品改良のため、予告なく仕様および価格等を変更する場合がありますので、ご了承ください。

■使用例

①有線式

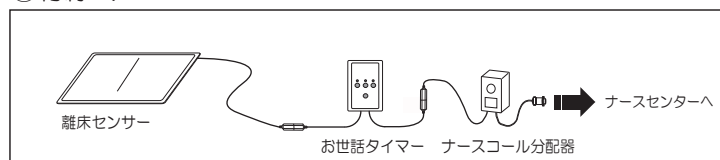

②ワイヤレス式

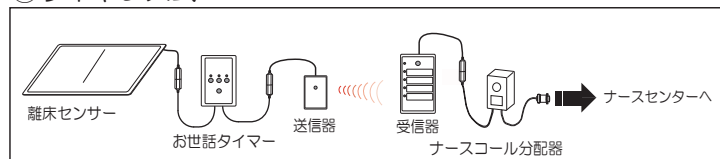

■仕様

商品名	お世話タイマー
品番	00222A00
外形寸法	幅69mm×長115mm×厚19.5mm
入力コード長	600mm
出力コード長	600mm
接続プラグ形状	φ3.5
電源	単4形アルカリ乾電池 × 3本
設定時間	3分、5分、10分
質量	170g
価格	8,000円（税抜）

ご注意

- 出力コード、入力コードは無理に引っ張ったり・折り曲げたりしないでください。
- 電池切れの場合は「お世話タイマー」のランプは点灯しません。乾電池（単4×3ヶ）を新品と交換してください。
- 離床センサーの接続プラグ形状を必ずご確認ください。

【販売店】

【製造販売元】 トクソー技研株式会社

〈本社〉 〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地
TEL : 0978-33-5595 FAX : 0978-33-5596
MAIL : info@amor.co.jp HP : http://tokso.net/