

# ベッド転落緩衝通報マット

やさしさをカタチに



トクソー技研株式会社

## 「クッションコールマット」



- ベッドの横に敷いて  
ベッド転落の衝撃をやわらげます。
- 衝撃吸収性に優れた素材と厚さ  
スポンジと5cmの厚さのクッション
- 収納が便利  
三つ折りで収納がコンパクト
- ベッドの脚に固定して安定セット
- 転落を圧センサーで検知して通報  
チャイムや無線で知らせます
- 色々な用途に使えます  
子供がベッドから転落  
添い寝の赤ちゃんが転落  
病院・施設でベッドから転落

ベッドからの転落を  
衝撃緩和

チャイムで通報

無線で通報



# ベッド転落緩衝通報マット

## 「クッションコールマット」

### 機能・構造



#### ①マット本体

スポンジと5cmの厚さのクッションでベッド転落の衝撃をやわらげます。

#### ②コントロールボックス

圧センサーで転落を検知し、外部通報器で通報します。

#### ③接続チューブ

#### ④閉止弁

#### ⑤

●転落を圧センサーで検知して通報  
チャイムや無線で知らせます

●色々な用途に使えます  
子供がベッドから転落  
添い寝の赤ちゃんが転落  
病院・施設でベッドから転落

ベッドから転落

落下衝撃を緩和

介護者に通報

### 使用方法

①ベッドの横に敷いてベッド転落の衝撃をやわらげます②空気弁を開いてマットを十分に膨らませます。

③マットが膨らんだら空気弁を閉じます。

④マットの空気チューブと圧センサーを接続します。

⑤圧センサーに外部出力機器を接続します。

- ・チャイム接続（その場で通報）
- ・ワイヤレス送受信機を接続（遠隔の介護者に通報）
- ・コールシステムに接続（病院・施設の管理に通報）

⑥マットをベッドの脚にベルトで固定します。

⑦誤ってベッドから転落すると衝撃を緩和し通報します。

※収納する場合

収納する場合は、空気弁を開いてマット内部の空気を逃がし三つ折りにして収納します。

ベッドの横に置いている絵

コントロール  
ボックス

ワイヤレス通報器

チャイム通報器



### 仕様

| 品名     | クッションコールマット         | クッションコールマット・チャイム     |
|--------|---------------------|----------------------|
| 品番     | 00228A00            | 00228B00             |
| 機能     | 落下衝撃の緩和、落下検知、外務出力通報 | 落下衝撃の緩和、落下検知、チャイムで通報 |
| 通報方式   | 外部出力付きで、有線や無線で通報    | 外落下をチャイムで通報、外部出力付き   |
| 質量     |                     |                      |
| 外形寸法   | 幅63cm×長200cm×厚5cm   |                      |
| JANコード |                     |                      |

【販売元】

トクソー技研株式会社

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地  
Tel 0978-33-5595 Fax 0978-33-5596

E-mail info@amor.co.jp HP <https://tokso.net/>



安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

製品の仕様、外観および画面表示は、改良のため予告なく変更することがあります。  
最新の情報はホームページでご確認いただけます。

<http://www.paramount.co.jp>